



UNISEPTA® Plus

Solución desinfectante lista para usar de calidad superior y a base de alcohol, para una rápida desinfección de superficies de dispositivos médicos. UNISEPTA® Plus es ideal para usar entre dos pacientes, ya que actúa rápidamente, en solo 30 segundos.

Características principales del producto:

- A base de etanol
- Amplio espectro de eficacia
- No mancha ni deja residuos
- Fresco perfume a limón
- Marcado CE - Cumple con la Directiva 93/42/EEC sobre dispositivos médicos - Clase IIa
- Certificado VAH/DGHM
- Cumple con las normas europeas

Composición:

100 g de UNISEPTA® Plus contienen 55 g de etanol, 0,11 g de propionato de didecilmetil oxietilamonio, perfume. (0.11g), fragrance.

Eficacia:

Bactericida
 Mycobacterium terrae
 SARM
 Candida albicans
 VIH-1
 PRV* (VHB)
 BVDV* (VHC)
 Herpesvirus
 Rotavirus
 Adenovirus
 Coronavirus bovino (SARS)
 Virus de la gripe H1N1



* PRV: Virus modelo de Hepatitis B
 * BVDV: Virus modelo de Hepatitis C
 * Coronavirus bovino: Virus modelo de SARS

Acondicionamiento:

Frasco de 750ml con vaporizador
 Bidón de 5 l



UNIDENT SA Rue François-Perréard 4, Case postale 142, CH - 1225 Chêne-Bourg
 Tel +41 22 839 79 00 Fax +41 22 839 79 10 Email info@unident.ch Web www.unident.ch

08/2012-05-ES

UNIDENT
 SWISS

UNISEPTA® Plus

PROTOCOLO DE USO

Antes de utilizar:

Asegurarse de llevar puestos los guantes adecuados.

Modo de uso:

UNISEPTA® Plus es un producto listo para usar, destinado a la desinfección de dispositivos médicos que ya hayan sido limpiados previamente. Antes de aplicarlo, verificar que la zona que se desee tratar sea compatible con el alcohol. Asegurarse de que los dispositivos eléctricos estén apagados.

Precauciones:

Para conocer las precauciones de uso, remitirse a la ficha de información sanitaria y de seguridad y a la etiqueta del producto. Producto clasificado como peligroso, según la norma europea 99/45/EEC y sus adaptaciones.

Cumple con las normas europeas:


Bactericida: EN 1040, EN 1276,
EN 13727, EN 14561
Tuberculicida: EN 14348
Levuricida: EN 1275, EN 13624

Datos físicos:


Color: Incoloro
Olor: Fresco perfume a limón
Almacenamiento: + 5°C a + 25°C
Conservación: 3 años
Envase: Hecho con material de PE reciclable



1: Verificar que la zona que se desee tratar haya sido limpiada previamente y sea resistente al alcohol.

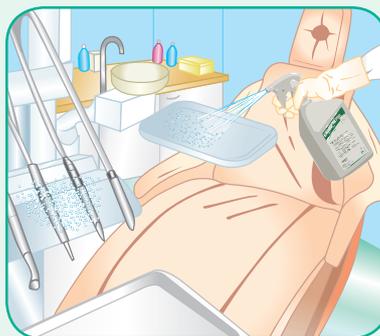

2: Vaporizar la zona con la solución uniformemente.

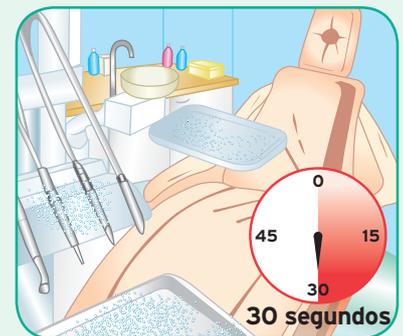

3: Dejar que la solución actúe 30 segundos, como mínimo. **NO ENJUAGAR.**

